

C-K JECT

INSTRUÇÕES DE USO

REF. C-K JECT 30GX16

Como usar:

Antes de usar as agulhas dentárias verifique o selo do cartucho!

1. Rompa o selo hermético
2. Primeiro insira o cartucho com anestésico na seringa e de seguida coloque a agulha
3. A agulha deve permanecer no interior da tampa de proteção até ser usada
4. Use a tampa de proteção para remover e quebrar a agulha após o seu uso
5. Certifique-se que descarta as agulhas usadas de forma adequada
 - a. Enrosque a tampa para abrir
 - b. Conecte a agulha na seringa
 - c. Remova a tampa
6. Condições de armazenamento
 1. Não armazene sob a luz solar direta, a temperaturas extremas ou em humidades altas
 2. Mantenha afastado da água

Use agulhas dentárias que combinem com o seu tipo de cartucho. Se não corresponder use um adaptador apropriado à sua seringa.

 **DENTAL IND.CO.,LTD.**

36, 133 BEON-GIL, SAMJAK-RO, OJEONG-GU, BUCHEON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA

TEL : + 82-32-679-1204 / 6 FAX : + 82-32-679-1207 E-MAIL : ck-dental@hanmail.net

EC REP | NECO TEC UK LIMITED

185, PRIORY ROAD LONDON, N8-8NB, UK

TEL. (44) (0) 20 8373 2331 FAX. (44) (0) 20 8347 5881